




## Support de canne Veloped – Instructions de montage

Porte-canne en 2 parties pour le Veloped qui sert également de sangle de sécurité lorsque le Veloped est plié pour le transport ou le rangement. Le porte-canne s'adapte à tous les modèles de Veloped.

Scannez le code QR avec votre smartphone ou votre appareil pour voir les instructions vidéo.

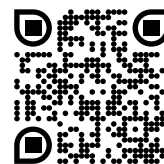

### ① Fixez le support arrière.

Enroulez le support arrière autour de la partie supérieure du tube vertical arrière du cadre, juste en dessous de l'attache rapide de réglage de la hauteur.



### ② Serrez bien la sangle.

Enroulez le support avant autour du tube supérieur du cadre, juste derrière la fixation de la barre de panier. Veillez à ce que la pièce antidérapante soit orientée vers le tube du cadre.



### ③ Ajustez la boucle arrière.

La taille de la bande arrière peut être ajustée en desserrant la fermeture en velcro. Vous devrez peut-être presser doucement la boucle pour obtenir une forme arrondie/circulaire.



#### ④ Fixez le support avant.

Enroulez le support avant autour du tube supérieur du cadre, juste derrière la fixation de la barre de panier. Veillez à ce que la pièce antidérapante soit orientée vers le tube du cadre.



#### ⑤ Ajustez la boucle avant.

La taille de la bande avant peut être ajustée en desserrant la fermeture en velcro. Vous devrez peut-être presser doucement la boucle pour obtenir une forme arrondie/circulaire.



#### ⑥ Attachez la canne.

Fixez la canne en la poussant par l'arrière, d'abord à travers le support arrière, puis à travers le support avant.



#### ⑦ Fixez le cadre.

Vous pouvez utiliser la sangle porte-canne pour sécuriser le cadre lorsqu'il est plié, lors du transport ou du rangement de votre Veloped.