




## **Support de canne de marche – instructions de montage**

Porte-canne en deux parties qui se fixe à la poignée et au cadre du Walker. La partie supérieure est dotée d'une fonction intelligente de verrouillage rapide, ce qui permet d'attacher et d'enlever rapidement la canne. Convient aux déambulateurs Walker 9er, 12er et 14er.

Scannez le code QR avec votre smartphone ou votre appareil pour voir les instructions vidéo.

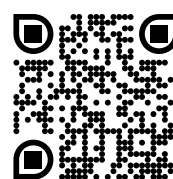

- ❶ Tournez le support supérieur de manière à ce que le logotype soit orienté vers le haut.



- ❷ Encliqueter le support sur la partie supérieure du tube de la poignée.

Encliqueter le support sur la partie supérieure du tube de la poignée et le visser à l'aide d'un tournevis cruciforme.




- ❸ Si vous fixez les deux supports de canne et le dossier

**Remarque :** Ajustez la position du levier de frein de manière à ce qu'il y ait de la place pour le porte-canne supérieur à côté du dossier. Il peut être nécessaire d'incliner le porte-canne vers l'extérieur, d'environ 30 degrés, pour faire tenir le porte-canne et le dossier sur le Walker.




#### 4 Fixer le support inférieur au cadre

Pour un montage à droite ou à gauche, tournez le support inférieur de manière à pouvoir atteindre la vis depuis l'extérieur du cadre. Pour fixer le support inférieur au cadre, enroulez la sangle autour du tube du cadre et poussez-la dans le trou du support.

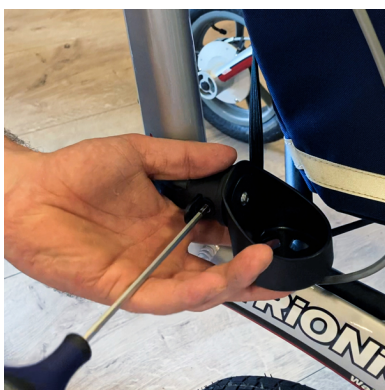

#### 5 Serrer la vis/la sangle

Serrer la vis/sangle à l'aide d'une clé Allen de 4 mm.

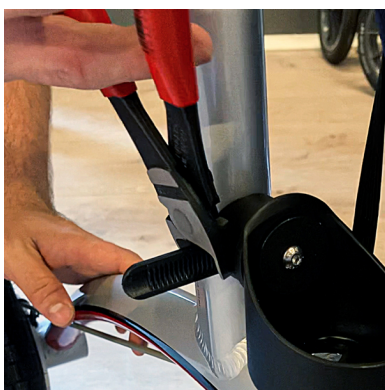

#### 6 Couper la longueur excessive de la sangle

Coupez la longueur excessive de la sangle à l'aide d'un coupe-câble.



#### 7 Prêt à l'emploi