



Manuel : Montage du porte-bouteille sur Walker 12er taille S



① Lieu d'assemblage du porte-bouteille (D ou G).



② Enroulez la sangle autour du tube du cadre et tirez-la à travers le support.



③ Tirez sur la sangle et tournez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la sangle.




④ Couper l'excédent de sangle.



⑤ Monter le deuxième support de la même manière.



⑥ Les deux supports sont correctement assemblés sur le tube du cadre.

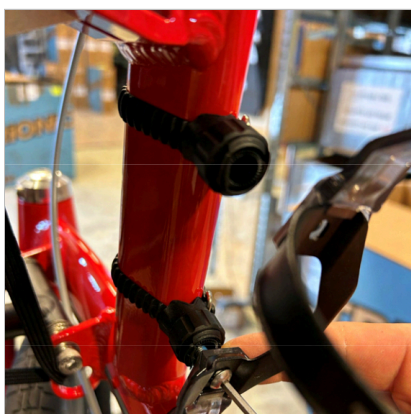

⑦ Fixez le porte-bouteille à l'aide des deux vis. L'ouverture du porte-bouteille doit être orientée vers l'extérieur.



⑧ Le porte-bouteille est maintenant fixé au cadre et vous introduisez la bouteille par le côté et la retirez vers l'extérieur.