

Manuel : Remplacement de la sangle du dossier du déambulateur Trionic



1 Dévissez la vis qui maintient la sangle avec une clé Allen de 3 mm.

Répétez de l'autre côté.



2 Assurez-vous de récupérer la vis, l'écrou et l'entretoise tubulaire.





Manuel : Remplacement de la sangle du dossier du déambulateur Trionic



5 Insérez la nouvelle sangle de remplacement dans le rembourrage.

IMPORTANT : Assurez-vous d'aligner l'extrémité de la sangle avec le logo TRIONIC comme indiqué sur la photo.



6 Insérez l'entretoise tubulaire dans le trou à l'extrémité de la sangle.

