



Sac de transport pour déambulateur - Instructions d'emballage


Le sac de transport Walker se compose d'un sac de transport principal et d'un plus petit sac de rangement/transport. Le sac de transport convient à tous les modèles Walker.

Le sac de transport convient à tous les modèles Walker.



- 1** Dézippez le sac de rangement et déballez le sac de transport principal.

Dézippez le sac de rangement et déballez le sac de transport principal.

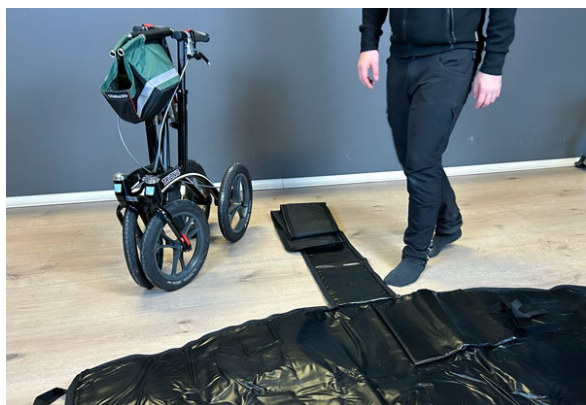


- 2** Étalez le sac principal.

Ouvrez la fermeture à glissière du sac principal sur toute sa longueur et dépliez les rabats du sac sur le sol.




- 3** Placez le déambulateur sur le sac.


Placez le Walker sur la partie centrale du sac de transport principal. Le sac principal est doté d'un rabat de protection rembourré intégré et d'une bande Velcro. Tirez le rabat de protection rembourré vers le haut et placez-le entre les fourches des roues avant afin de protéger la peinture.

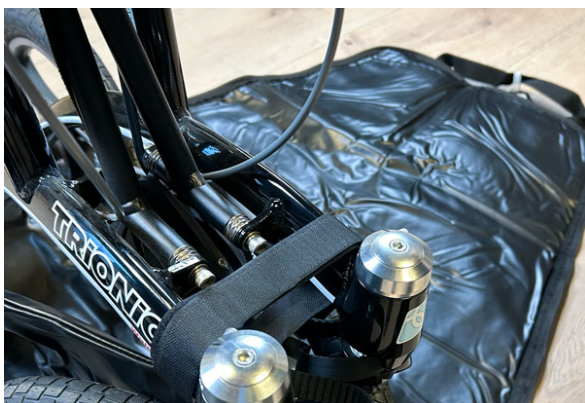

4 Fixez le cadre plié à l'aide de la bande Velcro intégrée.

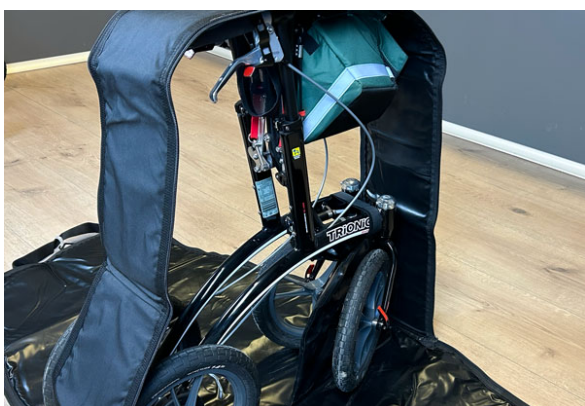

5 Repliez le rabat central sur le Walker.

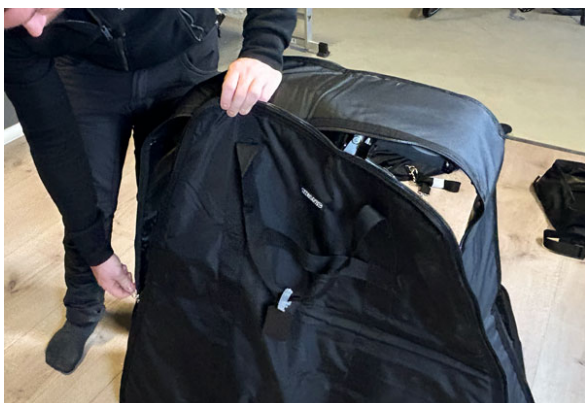


6 Soulevez les rabats latéraux et fermez la fermeture à glissière principale.



7 Cette photo montre le Walker correctement emballé.

Instructions d'emballage

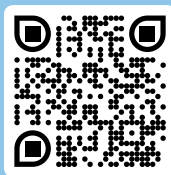

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent ou votre appareil pour visionner les instructions vidéo.